



Applicateur de pâtes

L'applicateur de pâtes permet une administration simple et rapide de toutes les pâtes alimentaires LANDMANS BEST. Pour ce faire, il suffit d'insérer la cartouche dans le pistolet, où elle trouve une prise sûre. Le mécanisme de pompage est protégé contre les salissures, ce qui lui confère une longue durée de vie. Grâce à sa course de 10 : 1, l'injecteur permet une administration sûre, rapide et précise. Le corps est très léger, ce qui réduit la fatigue lors du travail et améliore le confort de l'utilisateur.

Caractéristiques du produit :

- Effet de course 10:1 (1 course = 10 ml / 15 g)
- Poignée ergonomique
- Léger et compact
- Facile à charger et à décharger
- Le tube est maintenu en toute sécurité et peut être tourné de manière flexible
- Pas de cadre gênant l'accès aux endroits étroits
- Convient à toutes les cartouches courantes

Instructions pour le chargement et le déchargement :

1. pour charger une cartouche, tirer la tige du pistolet doseur complètement vers l'arrière.
2. couper l'extrémité de la cartouche avec un couteau et insérer la cartouche dans le pistolet doseur
3. enfoncer fermement la cartouche dans le pistolet jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être retirée
4. le pistolet de dosage est maintenant prêt à l'emploi. Pour utiliser le contenu de la cartouche, actionner le grand levier jusqu'à ce que le contenu sorte de l'embout.
5. pour remplacer la cartouche, tirer la barre complètement vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic - la cartouche est à nouveau libérée et peut être retirée.
6. Retirer la cartouche usagée et insérer la nouvelle cartouche.

Indications pour une utilisation correcte sur l'animal :

- N'administrer qu'aux vaches ayant un réflexe de déglutition évident.
- Veiller à ne pas blesser le pharynx lors de l'administration.
- Dévisser la rallonge de dosage et l'introduire latéralement dans la bouche, le long de la langue, et vider le contenu de manière à ce que l'animal puisse l'avalier.
- Après avoir vidé la cartouche, retirer prudemment et lentement le pistolet doseur de la gorge